



## FYZIO GEL CRYO

100 mL

Les mouvements répétitifs ou l'âge peuvent particulièrement solliciter certaines zones du corps. Le gel de massage effet froid permet de soulager rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques. Il sera indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, élongations, claquages et traumatismes divers.

### INGRÉDIENTS :

À base : d'extrait d'Harpagophytum BIO, d'hydrolat d'Eucalyptus BIO, d'huile de Calophyllum BIO, de Silice organique, de Menthol végétal.

### ALLÉGATIONS :

Soulage et apaise rapidement  
Anti douleur  
Effet froid immédiat et prolongé\*.  
Ne tache pas - non gras - ne colle pas.

*\*Etude caméra thermique, REF CT-01, Juin 2021.*

### CONSEILS D'UTILISATION :

Appliquer en massant légèrement, sans faire pénétrer, 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Refermer après usage.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Après utilisation, se laver les mains. Usage externe. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un pharmacien ou un centre anti-poison. Si les symptômes persistent ou s'accroissent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Un risque d'allergie ou de sensibilisation à l'un des composants est toujours possible, arrêtez le traitement en cas d'irritation ou de tout autre signe d'hypersensibilité. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif au fabricant et à l'Autorité Compétente nationale. **TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.**

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans. Application déconseillée sur la poitrine pour les femmes allaitantes.

### CONDITIONS DE STOCKAGE :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation. Conserver entre 4° et 40°C. Conserver à l'abri du soleil.

### MENTIONS OBLIGATOIRES :

À partir de 3 ans.  
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Fabricant : Laboratoire Polidis